



口腔内のやけどを防止するために

ハンドピースの故障や、誤った使用方法などにより、ヘッド部等が発熱し、口腔内のやけどを引き起こすおそれがあります。下記の点に注意してご使用ください。

使用上の警告・注意

警告

- ハンドピースが故障した場合、ヘッド部等が発熱により、やけどするおそれがあるため、口腔内軟組織に接触させないように使用してください。
- ボールベアリングは消耗品ですので、使用中に発熱や回転数の低下、異常な振動、異音を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- ヘッド・プッシュボタン・キャップが発熱の原因となり、患者さんがやけどするおそれがあるため、以下のような使い方はしないでください。
 - ※ 回転中にプッシュボタンを押す
 - ※ プッシュボタンが対合歯に当たった状態での使用

注意

- 患者さんにはラバーダム処置を行い使用してください。

使用する前に

使用する前に口腔外で下記の点検を行ってください。

- 約 10 秒間回転させ、回転数の低下や異常な振動、異音がないか
- 約 10 秒間の回転停止後、すぐにヘッド・プッシュボタン・キャップを手で触って発熱がないか

異常がある場合は、ハンドピースを使用せず、修理を依頼してください。

キャップが緩んでいないか、ヘッド・プッシュボタン・キャップの発熱がないか確認してください

