

口腔内のやけどを防止するために

ハンドピースの故障や、誤った使用方法などにより、ヘッド部等が発熱し、口腔内のやけどを引き起こすおそれがあります。下記の点に注意してご使用ください。

使用上の警告・注意

警告

- 使用中に発熱や回転速度の低下、異常な振動、異音などの異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。ボールベアリングは消耗品です。
- ハンドピースが故障した場合、ヘッド部等の発熱により、やけどするおそれがあるため、直ちに使用を中止してください。
- 回転が完全に停止してからバーの着脱を行ってください。回転中にプッシュボタンを押すと、やけどするおそれがあります。
- プッシュボタンやキャップが対合歯や頬粘膜などの口腔内軟組織に当たった状態で使用しないでください。歯髄の損傷や、やけどするおそれがあります。

注意


- 患者さんにはラバーダム処置を行い使用してください。

使用する前に


使用する前に口腔外で下記の点検を行ってください。

- キャップ、キャップ固定ねじが緩んでいないか
- 約 10 秒間回転させ、回転数の低下や異常な振動、異音がないか
- 約 10 秒間の回転停止後、すぐにヘッド・プッシュボタン・キャップを手で触って発熱がないか

キャップの緩み確認

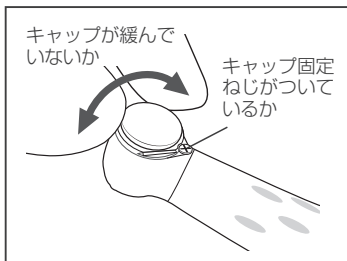

発熱確認

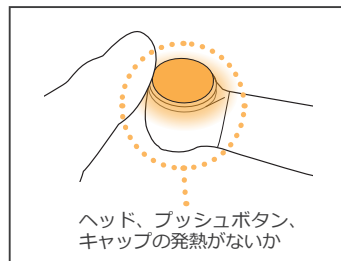

異常がある場合は、ハンドピースを使用せず、修理を依頼してください。