



## 口腔内のやけどを防止するために

ハンドピースの故障や、誤った使用方法などにより、ヘッド部等が発熱し、口腔内のやけどを引き起こすおそれがあります。取扱説明書や添付文書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

### 警告

- ボールベアリングの破損、ハンドピース内への異物の混入、腐食などによる内部部品の脱落によりプッシュボタンなどが発熱することがあります。やけどするおそれがあるため、発熱や回転速度の低下、異常な振動、異音などの異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。カートリッジは消耗品です。
- 回転が完全に停止してからパーの着脱を行ってください。回転中にプッシュボタンを押すと、やけどするおそれがあります。
- プッシュボタンやキャップが対合歯や頬粘膜などの口腔内軟組織に当たった状態で使用しないでください。歯髄の損傷や、やけどするおそれがあります。

### 注意

- 患者さんにはラバーダム処置を行い使用してください。

### 必ず各患者さんへの使用前に口腔外で下記の点検を行ってください。

- キャップ、キャップ固定ねじ（ツインパワータービンのみ）が緩んでいないか
- 約 10 秒間回転させ、回転数の低下や異常な振動、異音がないか
- 約 10 秒間の回転停止後、すぐにヘッド・プッシュボタン・キャップを手で触って発熱がないか、または、メンテナンスカードを用いて確認し、発熱がないか

異常がある場合は、ハンドピースを使用せず、修理を依頼してください。


メンテナンスカードの使い方については以下 QR コードから閲覧できます。

※ メンテナンスカードはツインパワータービン専用です。



メンテナンスカード（別売）  
コード No.5010005

#### キャップの緩み確認

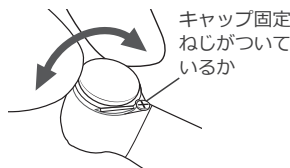

#### 発熱確認

