


## 1 Encender el Tri Auto mini: pulse el interruptor principal.

Aparecerá la pantalla de modo de espera.

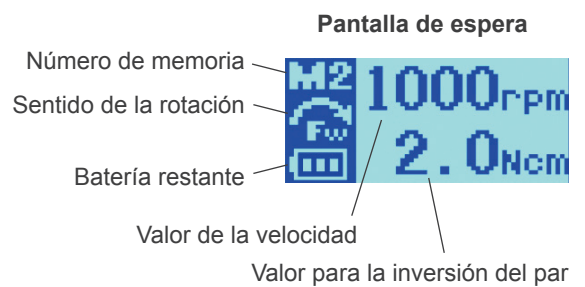

## 2 Seleccionar un número de memoria: pulse los botones "más" o "menos".

\* Hay seis memorias.

A continuación, se muestra la configuración predeterminada.


Opción	Memoria		
	M1, M4	M2, M5	M3, M6
Velocidad (rpm)	400	400	250
Inversión del par (Ncm)	1.0	0.8	0.6

## 3 Arrancar el motor: vuelva a pulsar el interruptor principal.

Aparecerá la pantalla del par.

\* Si mantiene pulsado el interruptor principal al arrancar el motor, únicamente funcionará mientras mantenga pulsado el interruptor, y se detendrá cuando lo suelte.

Pantalla del par

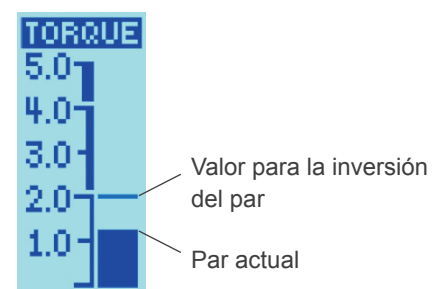

## 4 Detener el motor: vuelva a pulsar el interruptor principal.

Aparecerá de nuevo la pantalla de modo de espera.

