

# i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件

## 2025.02.21 現在

### (i-Dixel WEB Version 2.24.0 向け)

## 1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2025.02.21 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
  - Version 2.24.0 (3D, 2D, Lite)
  - ※ i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

## ⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

## 2. Mac コンピュータをお使いの方へ

本システム要件を満たす Mac コンピュータの OS(macOS)、およびウェブブラウザ(Safari)は、以下の通りです。

表 1. macOS のバージョンおよび Safari のシステム要件

ブラウザ macOS		Safari			
		15	16	17	18
Monterey	12	×	×	×	×
Ventura <sup>1</sup>	13		✓	✓	×
Sonoma	14			✓	×
Sequoia <sup>2</sup>	15				×

<sup>1</sup>: 近日対応終了予定

存在しない

<sup>2</sup>: 近日対応予定

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

### ⚠ 注意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。  
Mac コンピュータのハードウェア構成が、表 2 に示す構成であることを推奨します。

表 2. Mac コンピュータのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i5 2.5 GHz 以降
RAM	4.0 GB 以上