

i-Dixel WEB にアクセスできるタブレット端末のシステム要件

2020.01.21 現在

(i-Dixel WEB Version 2.12.1 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできるタブレット端末のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2020.01.21 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - ・ Version 2.12.1 (3D, 2D, Lite)
 - * i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. タブレット端末をお使いの方へ

本システム要件を満たすタブレット端末の OS は、Windows OS、iOS の 2 種類です。

本システム要件を満たすタブレット端末のウェブブラウザは、OS の種類に従います。

Windows OS の場合

本システム要件を満たす OS（表 1）、およびウェブブラウザ（表 2）は、以下の通りです。

尚、タブレット端末のハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

エディション Windows OS	(無印) / Starter / with Bing / Home / Home Basic / Home Premium	Pro / Professional	Ultimate	Enterprise / IoT Enterprise	RT / S
Windows XP, Vista	×	×	×	×	
Windows 7	×	✓	✓	✓	
Windows 8	×	×		×	×
Windows 8.1	×	✓		✓	×
Windows 10	×	✓		✓	×

： 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 2. Windows バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

ブラウザ Windows OS	Internet Explorer		Microsoft Edge*1				Google Chrome*6
	10 以前	11	16*2 以前	17*3	18*4	19*5	77*7
Windows XP, Vista	×						
Windows 7	×	✓					✓
Windows 8	×						×
Windows 8.1		✓					✓
Windows 10		✓*8	×	✓*9	✓	✓	✓

*1: EdgeHTML バージョン

*2: Windows 10 Fall Creators Update に相当

*3: Windows 10 April 2018 Update に相当

*4: Windows 10 October 2018 Update に相当

*5: Windows 10 May 2019 Update に相当

*6: 日本国内のみ。海外ではシステム要件外です。

*7: 動作確認済みバージョン。但し、これ以外の版は動作確認ができていません。

*8: Microsoft Edge を推奨 但し、Penviewer Recorder WEB によるペンスコープ・ペンビューアーの連携は Internet Explorer を使用してください。

*9: 近日対応終了予定

： 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i3 Haswell 世代以降 (Intel Core M を含まない)
RAM	2.0GB 以上 32bit OS (Windows10 以外) 3.0GB 以上 32bit OS (Windows10) 4.0GB 以上 64bit OS

iOS の場合

本システム要件を満たすタブレット端末の機種、および iOS、iPadOS は、表 4 で説明される通りです。尚、本システム要件を満たすウェブブラウザは、Safari のみです。

表 4. タブレット端末および iOS のシステム要件

iOS, iPadOS iPad ^{*1}	Safari			
	10 以前	11	12	13
iPad (第4世代) 以前	×			
iPad Air	×	✓ ^{*2}	✓	
iPad Air 2	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad (第5世代)	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad (第6世代)	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad Air (第3世代)			✓	× ^{*3}
iPad (第7世代)				× ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第1世代)	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad Pro 9.7-inch	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第2世代)	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad Pro 10.5-inch	×	✓ ^{*2}	✓	× ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第3世代)			✓	× ^{*3}
iPad Pro 11-inch			✓	× ^{*3}

*1: Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular モデルを含みます。

iPad モデルの確認方法は Apple のページに記載されています。

<https://support.apple.com/ja-jp/HT201471>

存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

*2: 近日対応終了予定。

*3: 下記の「iPadOS13 での使用について」を参照。

iPadOS13 での使用について

iPadOS13 の初期版において i-Dixel WEB の動作に問題が生じることが確認されているため、iPadOS13 での使用はシステム要件外としております。

現在、iPadOS13 の更新に合わせて動作確認中ですが、やむを得ず、iPadOS13 で i-Dixel WEB をご使用される場合は、iPadOS を 13.1.3 以降にアップデートした上で、以下に示す設定をブラウザで行ってください。

1. ブラウザを起動して、URL 欄の設定部をタップします。



2. 表示されるメニューから「Web サイトの設定」をタップします。



3. 「デスクトップ用 Web サイトを表示」をオフにします。



4. ブラウザを再起動します。

注 意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。

製造販売 株式会社モリタ製作所

20200121