

i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータ Windows タブレット端末のシステム要件 2021.10.08 現在 (i-Dixel WEB Version 2.16.1 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータ、Windows タブレット端末のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

(1) 本システム要件は、2021.10.08 時点での説明です。

(2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。

・ Version 2.16.1 (3D, 2D, Lite)

* i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

(3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
(4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Windows コンピュータ Windows タブレット端末をお使いの方へ

本システム要件を満たす Windows コンピュータ、Windows タブレット端末の OS(表 1)、およびウェブブラウザ(表 2)は、以下の通りです。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

エディション Windows OS	(無印) / Starter / with Bing / Home / Home Basic / Home Premium	Pro / Pro for WorkStation / Professional	Ultimate	Enterprise / IoT Enterprise	RT / S
Windows XP, Vista	×	×	×	×	
Windows 7	×	✓	✓	✓	
Windows 8	×	×		×	×
Windows 8.1	×	✓		✓	×
Windows 10	×	✓		✓	×

： 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 2. Windows バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

ブラウザ Windows OS	Internet Explorer		Microsoft Edge*1			Google Chrome*2
	10 以前	11	17*3 以前	18*4	91*5	91*5
Windows XP, Vista	×					
Windows 7	×	✓				✓
Windows 8	×					×
Windows 8.1		✓				✓
Windows 10		✓*6	×	✓*6	✓*6	✓

*1: EdgeHTML バージョン

*2: 日本国内のみ。海外ではシステム要件外です。

*3: Windows 10 April 2018 Update に相当

*4: Windows 10 October 2018 Update、
May 2019 Update、November 2019 Update、
May 2020 Update に相当
2021 年 11 月頃対応終了予定

*5: 動作確認済みバージョン。但し、これ以外の版は
動作確認ができていません。

*6: Microsoft Edge を推奨 但し、Penviewer Recorder
WEB によるペンスコープ・ペンビューアーの連携は
Internet Explorer または、Microsoft Edge 85 を使用
してください。

： 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

注 意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。
Windows コンピュータのハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i3 Haswell 世代以降 (Intel Core M を含まない)
RAM	2.0GB 以上 32bit OS(Windows10 以外) 3.0GB 以上 32bit OS(Windows10) 4.0GB 以上 64bit OS