

i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件

2022.05.21 現在

(i-Dixel WEB Version 2.18.0 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2022.05.21 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - Version 2.18.0 (3D, 2D, Lite)
 - * i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Mac コンピュータをお使いの方へ

本システム要件を満たす Mac コンピュータの OS(macOS)、およびウェブブラウザ(Safari)は、以下の通りです。

表 1. macOS のバージョンおよび Safari のシステム要件

ブラウザ macOS		Safari		
		13	14	15
Mojave	10.14	×	×	
Catalina	10.15	×	✓	✓
Big Sur	11.0		✓	✓
Monterey	12.0			✓

： 存在しない
×: システム要件を満たさない
✓: システム要件を満たす

⚠ 注 意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。
Mac コンピュータのハードウェア構成が、表 2 に示す構成であることを推奨します。

表 2. Mac コンピュータのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i5 2.5GHz 以降
RAM	4.0GB 以上