

i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータ Windows タブレット端末のシステム要件 2022.05.21 現在 (i-Dixel WEB Version 2.18.0 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータ、Windows タブレット端末のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2022.05.21 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - ・ Version 2.18.0 (3D, 2D, Lite)
 - * i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS (Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Windows コンピュータ Windows タブレット端末をお使いの方へ

本システム要件を満たす Windows コンピュータ、Windows タブレット端末の OS(表 1)、およびウェブブラウザ(表 2)は、以下の通りです。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

エディション Windows OS	(無印) / Starter / with Bing / Home / Home Basic / Home Premium	Pro / Pro for WorkStation / Professional	Ultimate	Enterprise / IoT Enterprise	RT / S
Windows XP, Vista	×	×	×	×	
Windows 7	×	✓	✓	✓	
Windows 8	×	×		×	×
Windows 8.1	×	✓		✓	×
Windows 10	×	✓		✓	×
Windows 11	×	✓			

存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 2. Windows バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

ブラウザ Windows OS	Internet Explorer		Microsoft Edge		Google Chrome ^{*1}
	10 以前	11	18 以前 ^{*2}	98 ^{*3}	98 ^{*3}
Windows XP, Vista	×				
Windows 7	×	✓			✓
Windows 8	×				×
Windows 8.1		✓			✓
Windows 10		✓ ^{*4}	×	✓	✓
Windows 11				✓	✓

*1: 日本国内のみ。海外ではシステム要件外です。

存在しない

*2: Microsoft Edge Legacy

×: システム要件を満たさない

*3: 動作確認済みバージョン。但し、これ以外の版は動作確認ができていません。

✓: システム要件を満たす

*4: Microsoft Edge を推奨

注 意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。
Windows コンピュータのハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i3 Haswell 世代以降 (Intel Core M を含まない)
RAM	2.0GB 以上 (Windows 8.1 以前の 32bit 版 OS) 3.0GB 以上 (Windows 10 32bit 版) 4.0GB 以上 (Windows 10 以前の 64bit 版 OS) 5.0GB 以上 (Windows 11)