

i-Dixel WEB にアクセスできる iPad のシステム要件

2022.05.21 現在

(i-Dixel WEB Version 2.18.0 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる iPad のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2022.05.21 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - Version 2.18.0 (3D, 2D, Lite)
 - * i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS (Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. iPad をお使いの方へ

本システム要件を満たす iPad、および iOS、iPadOS は、表 1 で説明される通りです。
尚、本システム要件を満たすウェブブラウザは、Safari のみです。

表 1. iPad および、iOS、iPadOS のシステム要件

iOS, iPadOS	13 以前	14	15
iPad ^{*1}			
iPad Air 以前	×		
iPad Air 2	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad (第5世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad (第6世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Air (第3世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad (第7世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad (第8世代)		✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Air (第4世代)		✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad (第9世代)			✓ ^{*3}
iPad Air (第5世代)			✓ ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第1世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 9.7-inch	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第2世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 10.5-inch	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第3世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 11-inch (第1世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第4世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 11-inch (第2世代)	×	✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 12.9-inch (第5世代)		✓ ^{*2}	✓ ^{*3}
iPad Pro 11-inch (第3世代)		✓ ^{*2}	✓ ^{*3}

*1: Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular モデルを含みます。
iPad モデルの確認方法は Apple のページに記載されています。

<https://support.apple.com/ja-jp/HT201471>

*2: ハードウェアキーボードと組み合わせて利用すると、一部の画面で文字が入力できないことを確認しています。

*3: バージョン 15.1 以降で対応します。このバージョンでは、画面が突然ホーム画面に切り替わることを確認しています。設定ダイアログの「ユーザー設定」における「2D の品質」を「高速」に設定して操作することを推奨します。

■: 存在しない
×: システム要件を満たさない
✓: システム要件を満たす

⚠ 注意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。