

# i-Dixel WEB にアクセスできるタブレット端末のシステム要件

## 2019.02.05 現在

### (i-Dixel WEB Version 2.9.2 向け)

#### 1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできるタブレット端末のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2019.02.05 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
  - Version 2.9.2 (3D, 2D, Lite)
  - \* i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。

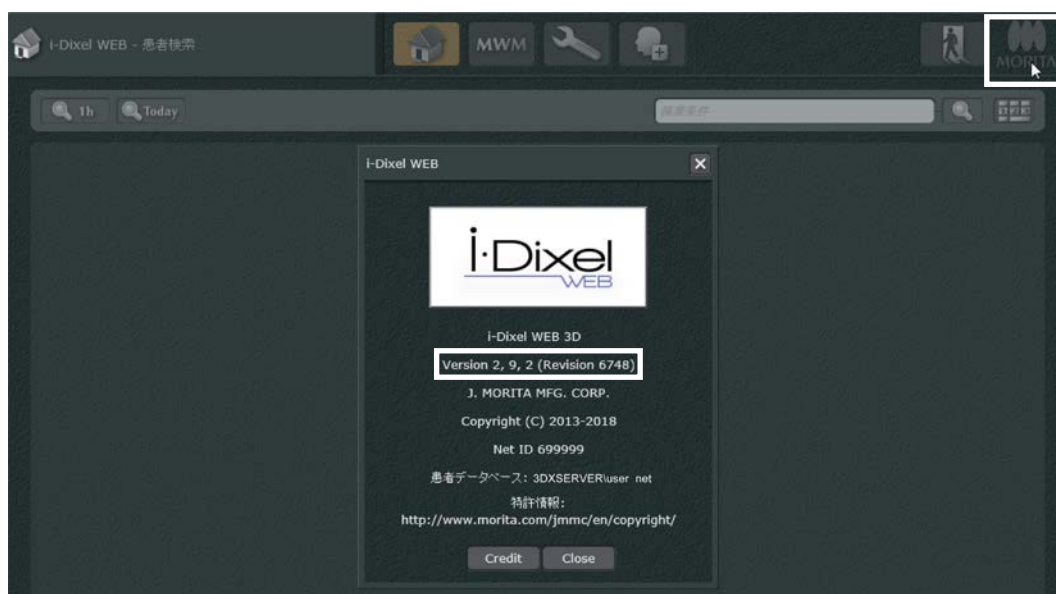


図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

#### ⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

## 2. タブレット端末をお使いの方へ

本システム要件を満たすタブレット端末の OS は、Windows OS、iOS の 2 種類です。  
本システム要件を満たすタブレット端末のウェブブラウザは、OS の種類に従います。

### Windows OS の場合

本システム要件を満たす OS (表 1)、およびウェブブラウザ (表 2) は、以下の通りです。  
尚、タブレット端末のハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

エディション	(無印) / Starter / with Bing / Home / Home Basic / Home Premium	Pro / Professional	Ultimate	Enterprise / Enterprise LSTB	RT / S
Windows XP, Vista	×	×	×	×	
Windows 7	×	✓	✓	✓	
Windows 8	×	×		×	×
Windows 8.1	×	✓		✓	×
Windows 10	×	✓		✓	×

□: 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 2. Windows バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

ブラウザ	Internet Explorer		Microsoft Edge <sup>*1</sup>					
	10 以前	11	13 以前	14 <sup>*2</sup>	15 <sup>*3</sup>	16 <sup>*4</sup>	17 <sup>*5</sup>	18 <sup>*6</sup>
Windows XP, Vista	×							
Windows 7	×	✓						
Windows 8	×							
Windows 8.1		✓						
Windows 10		✓ <sup>*7</sup>	×	✓ <sup>*8</sup>	✓ <sup>*8</sup>	✓	✓	× <sup>*9</sup>

\*1: EdgeHTML バージョン

\*8: 近日対応終了予定

\*2: Anniversary Update に相当

\*9: 近日対応予定

\*3: Creators Update に相当

\*4: Fall Creators Update に相当

□: 存在しない

\*5: April 2018 Update に相当

×: システム要件を満たさない

\*6: October 2018 Update に相当

✓: システム要件を満たす

\*7: Microsoft Edge を推奨 但し、Penviewer Recorder WEB によるペンスコープ・ペンビューアーの連携は Internet Explorer を使用してください。

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i3 Haswell 世代以降 (Intel Core M を含まない)
RAM	2.0GB 以上 32bit OS (Windows10 以外) 3.0GB 以上 32bit OS (Windows10) 4.0GB 以上 64bit OS

### iOS の場合

本システム要件を満たすタブレット端末の機種、および iOS は、表 4 で説明される通りです。尚、本システム要件を満たすウェブブラウザは、Safari のみです。

表 4. タブレット端末および iOS のシステム要件

iOS / iPad <sup>*1</sup>	8 以前	9	10 <sup>*2</sup>	11	12
iPad (第 1 世代)	×				
iPad 2	×	×			
iPad (第 3 世代)	×	×			
iPad (第 4 世代)	×	×	✓ <sup>*3</sup>		
iPad Air	×	×	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad Air 2	×	×	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad (第 5 世代)			✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad (第 6 世代)				✓	✓
iPad Pro 12.9 inch (第 1 世代)		×	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad Pro 9.7 inch		×	✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad Pro 12.9 inch (第 2 世代)			✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad Pro 10.5 inch			✓ <sup>*3</sup>	✓	✓
iPad Pro 12.9 inch (第 3 世代)					× <sup>*4</sup>
iPad Pro 11 inch					× <sup>*4</sup>

\*1: Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular モデルを含みます。

iPad モデルの確認方法は Apple のページに記載されています。

<https://support.apple.com/ja-jp/HT201471>

\*2: ただし、iOS 10.3.0 から 10.3.2 に搭載された Safari は通信が安定しないため、対象外とさせていただきます。

\*3: 近日対応終了予定。画像を開くと Safari がクラッシュする可能性があるため、推奨しません。

\*4: 近日対応予定。

□: 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

### ⚠ 注意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。

製造販売 株式会社モリタ製作所

20190205