

i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータのシステム要件

2019.02.05 現在

(i-Dixel WEB Version 2.9.2 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータのシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2019.02.05 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - Version 2.9.2 (3D, 2D, Lite)
 - * i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。

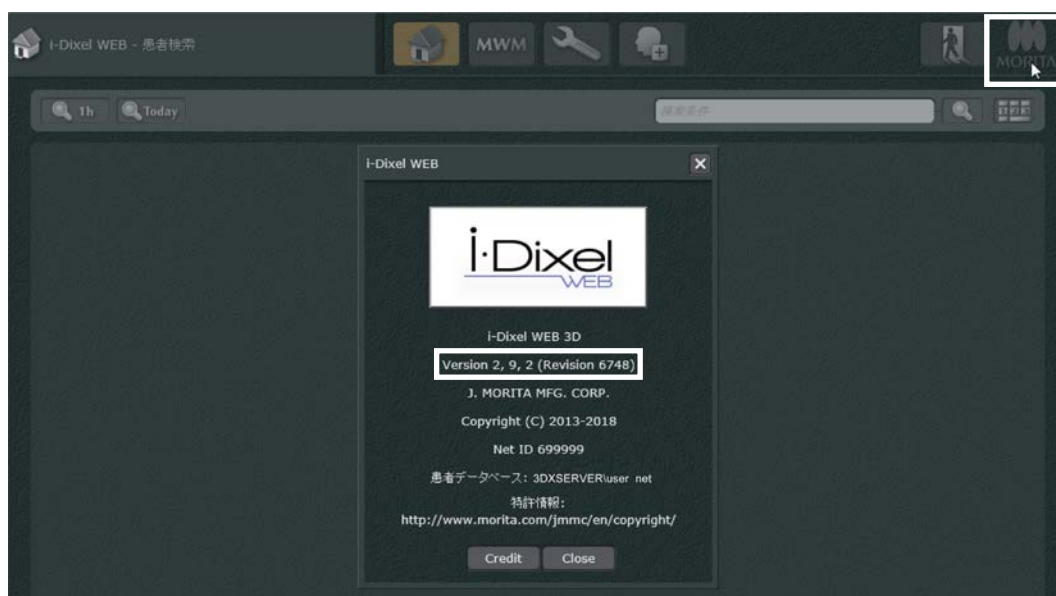


図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Windows コンピュータをお使いの方へ

本システム要件を満たす Windows コンピュータの OS(表 1)、およびウェブブラウザ(表 2)は、以下の通りです。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

Windows OS \ エディション	(無印) / Starter / with Bing / Home / Home Basic / Home Premium	Pro / Professional	Ultimate	Enterprise / Enterprise LSTB	RT / S
Windows XP, Vista	×	×	×	×	
Windows 7	×	✓	✓	✓	
Windows 8	×	×		×	×
Windows 8.1	×	✓		✓	×
Windows 10	×	✓		✓	×

□: 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 2. Windows バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

Windows OS \ ブラウザ	Internet Explorer		Microsoft Edge ^{*1}					
	10 以前	11	13 以前	14 ^{*2}	15 ^{*3}	16 ^{*4}	17 ^{*5}	18 ^{*6}
Windows XP, Vista	×							
Windows 7	×	✓						
Windows 8	×							
Windows 8.1		✓						
Windows 10		✓ ^{*7}	×	✓ ^{*8}	✓ ^{*8}	✓	✓	× ^{*9}

*1: EdgeHTML バージョン

□: 存在しない

*2: Anniversary Update に相当

×: システム要件を満たさない

*3: Creators Update に相当

✓: システム要件を満たす

*4: Fall Creators Update に相当

*5: April 2018 Update に相当

*6: October 2018 Update に相当

*7: Microsoft Edge を推奨 但し、Penviewer Recorder WEB によるペンスコープ・ペンビューアーの連携は Internet Explorer を使用してください。

*8: 近日対応終了予定

*9: 近日対応予定

 **注意**

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。
Windows コンピュータのハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i3 Haswell 世代以降 (Intel Core M を含まない)
RAM	2.0GB 以上 32bit OS(Windows10 以外) 3.0GB 以上 32bit OS(Windows10) 4.0GB 以上 64bit OS