

i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータ Windows タブレット端末のシステム要件 2024.07.19 現在 (i-Dixel WEB Version 2.22.0 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Windows コンピュータ、Windows タブレット端末のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2024.07.19 時点での説明です。
 - (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - Version 2.22.0 (3D, 2D, Lite)
- ※ i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。



図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS (Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Windows コンピュータ Windows タブレット端末をお使いの方へ

本システム要件を満たす Windows コンピュータ、Windows タブレット端末の OS(表 1)、ウェブブラウザ(表 2)および、拡大表示するために必要なディスプレイの解像度(表 3)は、以下の通りです。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

Windows OS	エディション	(無印) / Starter / with Bing / Home / Home Basic / Home Premium	Pro / Pro for WorkStation / Professional	Ultimate	Enterprise / IoT Enterprise	RT / S
	Windows XP, Vista	×	×	×	×	×
Windows 7	×	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	
Windows 8	×	×	×		×	×
Windows 8.1	×	✓ ^{*1}			✓ ^{*1}	×
Windows 10	×	✓			✓	×
Windows 11	×	✓			✓	

*1: 近日対応終了予定

□: 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

表 2. Windows バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

ブラウザ	Internet Explorer		Microsoft Edge			Google Chrome ^{*1}	
	10 以前	11	18 以前 ²	109	118 ^{*3}	109	118 ^{*3}
Windows XP, Vista	×						
Windows 7	×	×		✓ ^{*4}		✓ ^{*4}	
Windows 8	×						
Windows 8.1		×		✓ ^{*4}		✓ ^{*4}	
Windows 10		×	×	×	✓	×	✓
Windows 11				×	✓	×	✓

*1: 日本国内のみ。海外ではシステム要件外です。

□: 存在しない

*2: Microsoft Edge Legacy

×: システム要件を満たさない

*3: 動作確認済みバージョン。但し、これ以外の版は動作確認ができていません。

✓: システム要件を満たす

*4: 近日対応終了予定

表 3. 画面の拡大率とディスプレイの解像度に関するシステム要件

画面の拡大率 ^{*1}	ディスプレイの解像度 ^{*2}
100%	768 px 以上
125%	960 px 以上
150%	1152 px 以上
175%	1344 px 以上
200%	1536 px 以上

*1: 画面の拡大率は、Windows11 では「拡大縮小」、Windows10 では「全体を大きくする」または、「テキスト、アプリ、その他項目のサイズを変更する」で設定できます。

Microsoft Surface 等の高解像度環境を除くと、通常、画面の拡大率は 100% で設定されます。

*2: 設定した拡大率で画面を表示するために必要なディスプレイの横幅 (または縦幅) のピクセル数です。

注意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。

Windows コンピュータのハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i3 Haswell 世代以降 (Intel Core M を含まない)
RAM	2.0 GB 以上 (Windows 8.1 以前の 32bit 版 OS) 3.0 GB 以上 (Windows 10 32bit 版 OS) 4.0 GB 以上 (Windows 10 以前の 64bit 版 OS) 4.0 GB 以上 (Windows 11)