

i-Dixel WEB にアクセスできるタブレット端末のシステム要件  
2016.02.19 現在  
( i-Dixel WEB Version 2.7.0 , 2.7.1 , 2.7.2 向け)

## 1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできるタブレット端末のシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2016.02.19 時点での説明です。
  - (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
    - ・ Version 2.7.0 (3D, 2D, Lite)
    - ・ Version 2.7.1 (3D, 2D, Lite)
    - ・ Version 2.7.2 (3D, 2D, Lite)
- \*i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックすると表示される、ダイアログで確認できます。

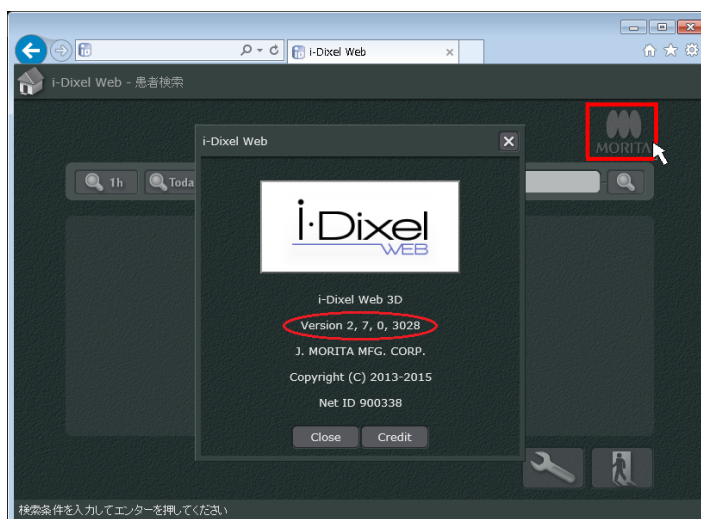


図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS (Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

### ⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

## 2. タブレット端末をお使いの方へ

本システム要件を満たすタブレット端末の OS は、Windows OS、iOS の 2 種類です。  
 本システム要件を満たすタブレット端末のウェブブラウザは、OS の種類に従います。

### Windows OS の場合

本システム要件を満たす OS (表 1)、およびウェブブラウザ(表 2)は、以下の通りです。  
 尚、タブレット端末のハードウェア構成が、表 3 に示す構成であることを推奨します。

表 1. Windows OS バージョンおよびエディションのシステム要件

| Windows OS \ エディション | (無印) /<br>Starter /<br>Home /<br>Home Basic /<br>Home Premium | Pro /<br>Professional | Ultimate | Enterprise      | Education       | RT |
|---------------------|---|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|----|
| Windows XP          | ×   | ×                     |          | ×               |                 |    |
| Windows Vista       | ×   | ×                     | ×        | ×               |                 |    |
| Windows 7           | ×   | ✓                     | ✓        | ✓               |                 |    |
| Windows 8/8.1       | × <sup>*1</sup>   | ✓                     |          | ✓               |                 | ×  |
| Windows 10          | ×   | × <sup>*2</sup>       |          | × <sup>*2</sup> | × <sup>*2</sup> |    |

\*1: with Bing を含む

\*2: 近日対応予定

存在しない  
 × システム要件を満たさない  
 ✓ システム要件を満たす

表 2. Windows OS バージョンおよびウェブブラウザのシステム要件

| Windows OS \ ブラウザ | Internet Explorer |   |   |   |    |                 | Microsoft Edge   |                  |
|-------------------|-------------------|---|---|---|----|-----------------|------------------|------------------|
|                   | 6                 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11              | 12 <sup>*3</sup> | 13 <sup>*3</sup> |
| Windows XP        | ×                 | × | × |   |    |                 |                  |                  |
| Windows Vista     |                   | × | × | × |    |                 |                  |                  |
| Windows 7         |                   |   | × | × | ✓  | ✓               |                  |                  |
| Windows 8         |                   |   |   |   | ✓  |                 |                  |                  |
| Windows 8.1       |                   |   |   |   |    | ✓               |                  |                  |
| Windows 10        |                   |   |   |   |    | × <sup>*4</sup> | × <sup>*4</sup>  | × <sup>*4</sup>  |

\*3: EdgeHTML バージョン

\*4: 近日対応予定

存在しない  
 × システム要件を満たさない  
 ✓ システム要件を満たす

表 3. Windows クライアントのハードウェア推奨構成

|     |  |
|-----|--|
| CPU | Intel Core i3 Haswell 世代以降<br>(Intel Core M を含まない) |
| RAM | 2.0GB 以上(32bit OS)<br>4.0GB 以上(64bit OS)           |

## iOS の場合

本システム要件を満たすタブレット端末の機種、および iOS は、表 4 で説明される通りです。尚、本システム要件を満たすウェブブラウザは、Safari のみです。

表 4. タブレット端末および iOS のシステム要件

| iPad*5 \ iOS | iOS |   |   |   |   |   |     |
|--------------|-----|---|---|---|---|---|-----|
|              | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   |
| iPad         | ×   | × | × |   |   |   |     |
| iPad 2       |     | × | × | × | × | × | ×   |
| iPad (第3世代)  |     |   | × | × | ✓ | ✓ | ✓   |
| iPad (第4世代)  |     |   |   | × | ✓ | ✓ | ✓   |
| iPad Air     |     |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓   |
| iPad Air 2   |     |   |   |   |   | ✓ | ✓   |
| iPad Pro     |     |   |   |   |   |   | ×*6 |

存在しない  
× システム要件を満たさない  
✓ システム要件を満たす

\*5: Wi-Fi, Wi-Fi + Cellular モデルを含みます。

iPad モデルの確認方法は Apple のページに記載されています。

<https://support.apple.com/ja-jp/HT201471>

\*6: 近日対応予定

## ⚠ 注意

- システム要件が満たされていても、タブレット端末の性能が影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。  
尚、タブレット端末の OS が iOS である場合、iPad Air、または iPad Air 2 で i-Dixel WEB にアクセスされることを推奨します。