


# ツインパワータービン 4H メンテナンスガイド

ツインパワータービン 4H シリーズ (ボールベアリング、プッシュチャック、4H、他社ジョイント)

4H

確実なメンテナンスを行わないとハンドピースの早期故障につながります。  
必ず下記の手順で、各患者さんへの使用后すみやかに行ってください。

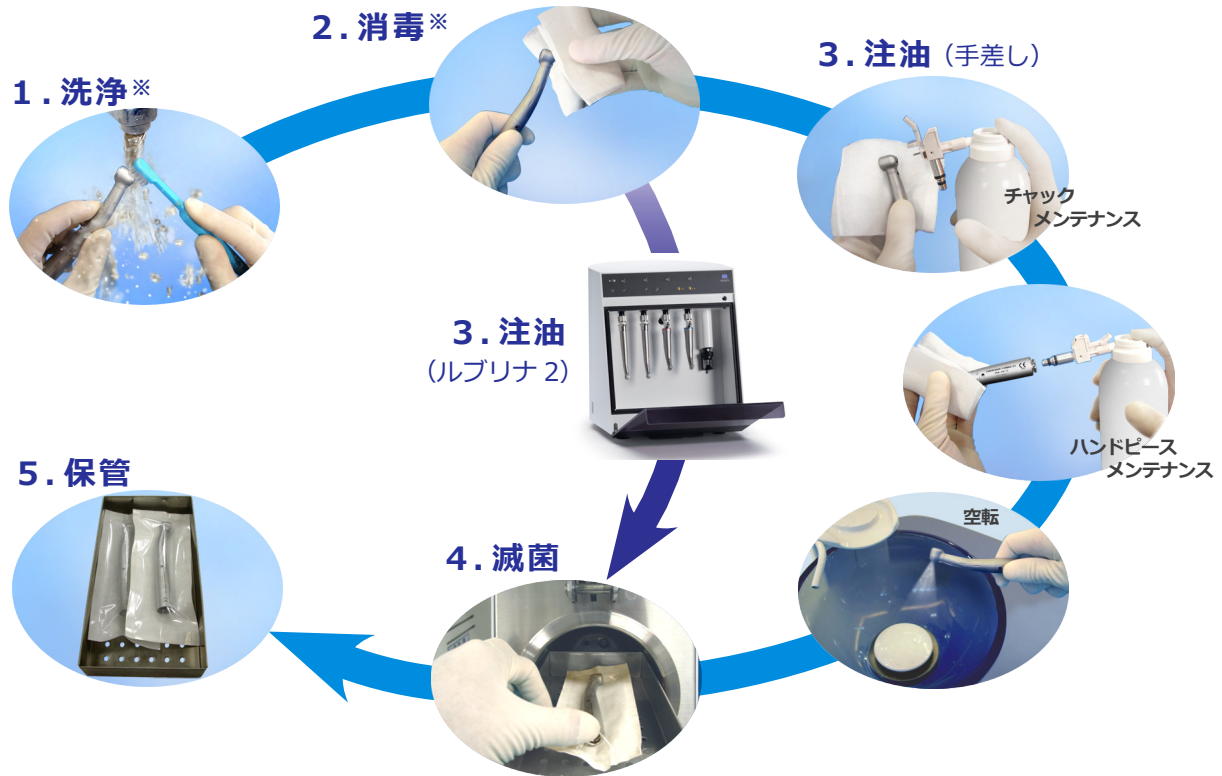

## ご使用前に

使用する前に口腔外で下記の点検を行ってください。

- ・約10秒間回転させ、回転数の低下や異常な振動、異音がないか
  - ・約10秒間の回転停止後、すぐにヘッド・プッシュボタン・キャップを手で触って発熱がないか
- 異常がある場合は、ハンドピースを使用せず、修理を依頼してください。

注油には、**モリタマルチスプレー**を使用してください。

### 1. 洗浄

- ・バー・ポイントを取外し、ヘッドに付着した切削粉・血液等を柔らかいブラシなどで流水洗浄し、乾燥させます。
  - ・ハンドピースを薬液、機能水に浸さないでください。
- △: ハンドピース及びバー・ポイントに薬液、機能水が付着した場合は必ず流水で洗い流してください。

### 2. 消毒

- ・ハンドピース全体をガーゼなどを用い消毒用エタノールで清拭します。

※ ・マークの付いているハンドピースは高温洗浄消毒器により洗浄と消毒が行えます。

△: 高温洗浄消毒器をご使用の際は製品に添付されている当社指定条件を遵守してください。



### 3. 注油

#### 手差しでの注油

- ・チャック及びハンドピースに2秒注油します。
  - ・15秒以上空転させ、ヘッド内の余分なオイルを除去します。
- △: スプレーノズルはハンドピースのジョイントに適したものを使用してください。
- 注油の際はミストが飛散して目に入らない様、ガーゼ等で覆ってください。
- 空転の際はプッシュキャップを押さないでください。

チャックメンテナンス用ノズル



ハンドピースメンテナンス用ノズル



#### ルブリナ2での注油

- ・チャック及びハンドピースに注油します。
- △: ルブリナ2の使用方法は取扱説明書をご覧ください。



### 4. 滅菌

- ・表面に付着したオイルをガーゼ等でふき取ります。
- ・滅菌バッグに入れ、オートクレーブ滅菌をします。

△: 滅菌・乾燥温度は、135℃以下で行ってください。



### 5. 保管

- ・オートクレーブから取り出し、乾燥した環境で保管します。

## NOTE

- ・メンテナンス時は、ゴーグルやグローブ、マスクなどの个人防护具 (PPE) を着用して使用してください。
- ・詳細は取扱説明書をご覧ください。