


# トライオートZX2 再生処理(お手入れ)

※ 製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。  
 ※ ゴーグルやグローブ、マスクなどの个人防护具 (PPE) を着用してください。

## 再生処理前の準備


STEP 1  
電源OFF

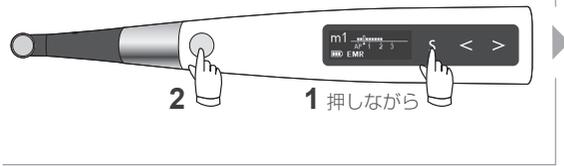

STEP 2  
ファイル



STEP 3  
透明カバー

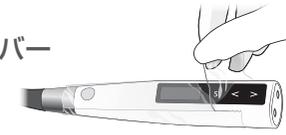


**警告**  
透明カバーは再利用禁止です。

## 再生処理

### オートクレーブ滅菌するもの

- a. ファイルホルダー
- b. 対極
- c. コントラアングル
- d. ハンドピースホルダー \*
- e. 外部ファイル電極付きキャップ \*

STEP 1  
前処理

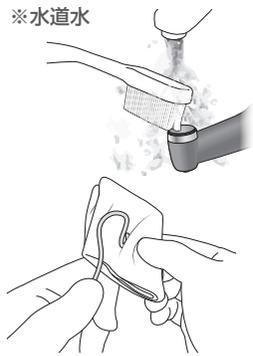

STEP 2  
洗浄・消毒

ウォッシャーディズインフェクター  
当社推奨条件

モリタ WD-150、IC Washer


運転モード	+90℃ 5分
洗剤 [濃度]	アイエスザイム [0.5% (初期設定値)]
すすぎ剤 [濃度]	アイエスミルク [0.15% (初期設定値)]

ミーレ G7881


運転モード	Vario TD
洗剤 [濃度]	ネオディッシャー液体洗剤 [0.3% - 0.5%]
すすぎ剤 [濃度]	ネオディッシャーすすぎ剤 [0.03% - 0.05%]

STEP 3  
注油 (コントラアングルのみ)

モリタマルチスプレーで  
2秒注油します。  
注油後、余分なスプレー液を  
除去してください。

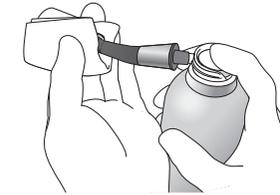

STEP 4  
包装

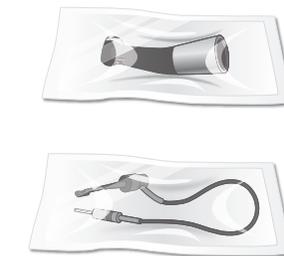

STEP 5  
滅菌

推奨条件：  
+134℃で6分以上  
又は  
+121℃で60分以上

### 消毒するもの


- f. モーターハンドピース
- g. プロープコード
- h. ガイドバー
- i. 根管長テスター
- j. 充電器

STEP 1  
前処理



STEP 2  
清拭・消毒

※消毒用エタノール

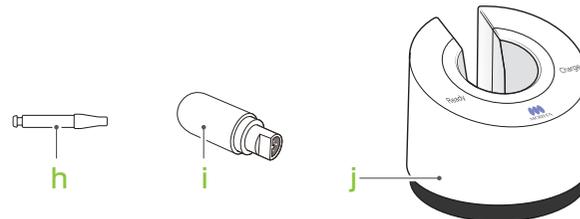

\* オプション (別売) です

