

i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件

2018.12.17 現在

(i-Dixel WEB Version 2.9.2 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2018.12.17 時点での説明です。
- (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - Version 2.9.2 (3D, 2D, Lite)
 - * i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックして、ダイアログを表示すると確認できます。

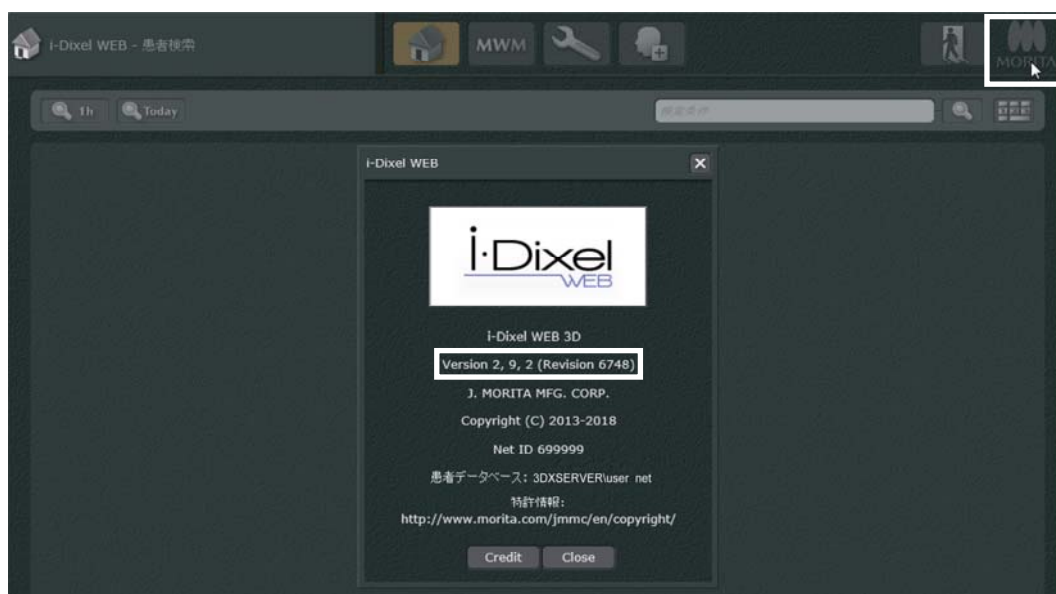


図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS(Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Mac コンピュータをお使いの方へ

本システム要件を満たす Mac コンピュータの OS(OS X, macOS)、およびウェブブラウザ(Safari)は、以下の通りです。

表 1. OS X、macOS のバージョンおよび Safari のシステム要件

OS X、macOS		Safari				
		8	9	10	11	12
Yosemite	10.10	×				
El Capitan	10.11		✓ ^{*2}			
Sierra	10.12 ^{*1}			✓ ^{*2}		
High Sierra	10.13				✓	
Mojave	10.14					✓

*1: ただし、macOS Sierra 10.12.4 から 10.12.5 に搭載された Safari は通信が安定しないため、対象外とさせていただきます

*2: 近日対応終了予定

□: 存在しない

×: システム要件を満たさない

✓: システム要件を満たす

⚠ 注意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。
Mac コンピュータのハードウェア構成が、表 2 に示す構成であることを推奨します。

表 2. Mac コンピュータのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i5 2.5GHz 以降
RAM	4.0GB 以上