

i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件
2016.02.19 現在
(i-Dixel WEB Version 2.7.0 , 2.7.1 , 2.7.2 向け)

1. はじめに

i-Dixel WEB は、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末のウェブブラウザで、アクセスできます。

アクセスの際、Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末が、本システム要件を満たしている必要があります。

以下に、i-Dixel WEB にアクセスできる Mac コンピュータのシステム要件を説明します。

尚、説明にあたり、以下の内容を前提とします。

- (1) 本システム要件は、2016.02.19 時点での説明です。
 - (2) 本システム要件は、以下に示す i-Dixel WEB のバージョン向けです。
 - ・ Version 2.7.0 (3D, 2D, Lite)
 - ・ Version 2.7.1 (3D, 2D, Lite)
 - ・ Version 2.7.2 (3D, 2D, Lite)
- *i-Dixel WEB のバージョンは、ホーム画面右上のロゴをクリックすると表示される、ダイアログで確認できます。

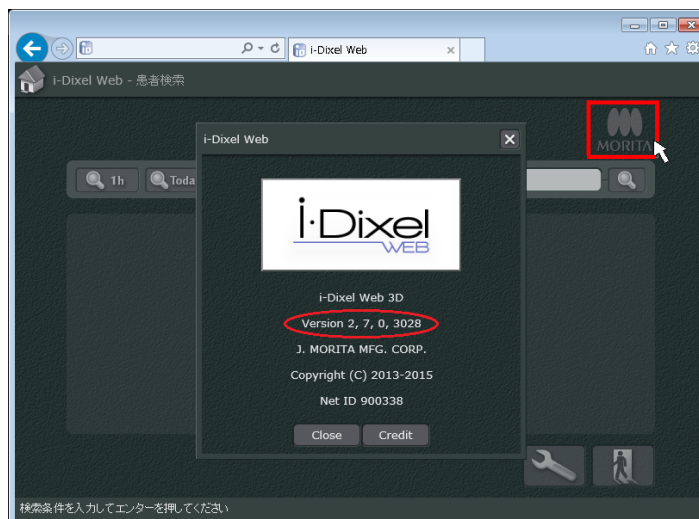


図 1. i-Dixel WEB バージョン情報の確認方法

- (3) 本説明に記載されない OS (Operating System)、ウェブブラウザでは、i-Dixel WEB の動作を保証しません。
- (4) 本説明は、i-Dixel WEB を院内ネットワークのみで動作することを前提とします。

⚠ 注意

- Windows コンピュータ、Mac コンピュータ、タブレット端末の OS、ウェブブラウザが最新バージョンであっても、本システム要件を満たさない場合があります。OS、ウェブブラウザをアップデートされる場合は、事前に本システム要件をご確認ください。

2. Mac コンピュータをお使いの方へ

本システム要件を満たす Mac コンピュータの OS (Mac OS X)、およびウェブブラウザ (Safari) は、以下の通りです。

表 1. Mac OS X のバージョンおよび Safari のシステム要件

Mac OS X \ ブラウザ		Safari			
		6	7	8	9
Mountain Lion	10.8	×			
Mavericks	10.9.0		✓		
	10.9.5				× ^{*1}
Yosemite	10.10.0			✓	
	10.10.5				× ^{*1}
El Capitan	10.11.0				× ^{*1}

*1: 近日対応予定

存在しない
× システム要件を満たさない
✓ システム要件を満たす

⚠ 注意

- システム要件が満たされていても、ハードウェア構成、インストールされているソフトウェアなどが影響して、i-Dixel WEB の操作性が著しく損なわれる場合があります。
Mac コンピュータのハードウェア構成が、表 2 に示す構成であることを推奨します。

表 2. Mac コンピュータのハードウェア推奨構成

CPU	Intel Core i5 2.5GHz 以降
RAM	4.0GB 以上